


immunoCHECK

Impfen Ja, aber mit Verstand!

Vielen Dank, dass Sie sich für immunoCHECK entschieden haben; zum Wohle Ihres Tieres. Lassen Sie von Ihrem Tierarzt eine Blutprobe Ihres Tieres entnehmen und wir sagen Ihnen, ob Ihr Tier genügend Antikörper hat - dank modernstem Testverfahren!

Schnell, präzise und unkompliziert:

1. Lassen Sie von Ihrem Tierarzt eine Blutprobe Ihres Tieres entnehmen und schicken uns das beiliegende Blutprobe-Röhrchen zur Analyse ein.
2. Füllen Sie das untenstehende Formular mit leserlicher Schrift aus (Kugelschreiber oder wasserfester Filzstift).
3. Legen Sie das Blutprobe-Röhrchen in die Vertiefung der Verpackung.
4. Trennen Sie das Formular ab und legen Sie es in den Deckel der Verpackung.
5. Kleben Sie die vorfrankierte Rücksende-Etikette auf die Verpackung.
6. Schliessen Sie die Verpackung und kleben Sie den Deckel zu.
7. Werfen Sie das Päckli in einen Briefkasten der Schweizerischen Post.

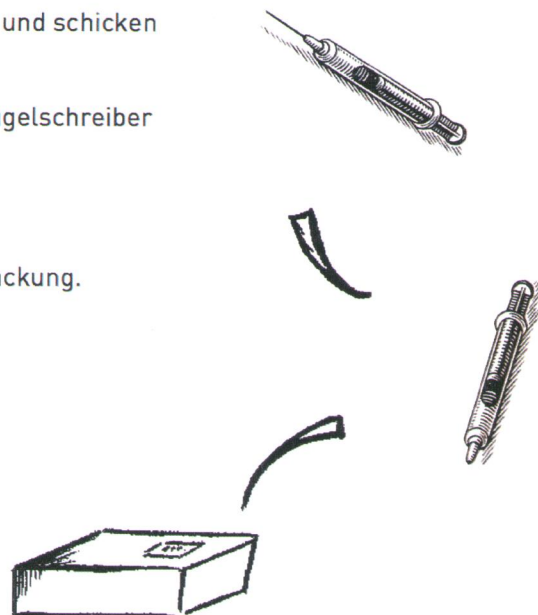

In wenigen Tagen erhalten Sie elektronische Post von uns!

Nach Eingang der Blutprobe, erhalten Sie das Ergebnis der Analyse innerhalb von 3 Arbeitstagen. Falls nicht, bitten wir Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen: 062 211 00 00 / info@microstech.com



Angaben zum Tier

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Das Formular muss zwingend mit der Probe zurückgesandt werden. Personen- und Tierdaten werden vertraulich behandelt. Auf Wunsch werden die Resultate per E-Mail an den Tierarzt weitergeleitet.

Tier Hund Katze

Name: PEPE

Rasse: COCKER SPANIEL

Geschlecht: M

ANIS-Nr. 75655555555555

Besitzer

Name / Vorname: MÜLLER SANDRA

Adresse: FUCHSRING 28

PLZ / Ort: 4600 OLTEN

E-Mail: sandra.mueller@provider.ch

Telefon: 062 / 211 00 99

Tierarzt

Name / Vorname: Dr. med.vet. HANS WOLF

Praxis: KLEINTIERPRAXIS CANIS LUPUS

PLZ / Ort: 4600 OLTEN

E-Mail: info@canislupus.ch

Für interne Zwecke (nicht ausfüllen)

Projekt:

Befund: